

TINKLELINIAI TVARŠČIAI: „Grassolind neutral“ ir „Atrauman“



Netinkamai prižiūrint žaizdą, tepant įvairiais tepalais, galima ne tik ilgam užtęsti gydymą, užkrėsti žaizdą, bet ir sukelti alerginius audinių pažeidimus. Tai ypač aktualu gydant pacientus, kurie yra alergiški, jautrūs įvairiems medikamentams bei medžiagoms.

Vokietijos kompanija „Hartmann“ siūlo du nemedikamentinius, neprilimpančius prie žaizdos tvarščius – „Grassolind neutral“ ir „Atrauman“. Abiejų tvarščių medžiagos struktūra sukurta taip, kad tvarstis nepriliptų prie žaizdos, o tepalo sudedamosios dalys nedirgintų odos. Taigi „Atrauman“ ir „Grassolind neutral“ gali būti gydomi pacientai, kurių jautri oda, taip pat pacientai, jautrūs tam tikriems medikamentams.

„Grassolind neutral“ – stambaus audimo medvilninis tinklelinis tvarstis, impregnuotas nemedikamentiniu neutraliu tepalu ant parafininio pagrindo. Tepalas nepasišalina net esant labai stipriai žaizdos sekrecijai.

Apibūdinimas

- Esant bet kuriai žaizdos gijimo fazei, „Grassolind neutral“ tvarstis išlaiko žaizdos kraštus elastingus ir apsaugo žaizdą nuo išdžiūvimo. Skatina granuliacijos ir reepitelizacijos procesus bei veiksmingai apsaugo nuo randinio audinių susitraukimo.

- Impregnuotas tepalu tvarstis neprilimpa prie žaizdos. Tvarščio keitimas nesukelia skausmo, nepažeidžiamas granuliacinis audinys bei naujai susiformavęs epitelis.

- Atviras tinklelinis audinys pralaidus orui ir sekretui, žaizdos sekretas lengvai drenuojasi į antrinį absorbuojamąjį tvarstį (pvz., „Sterilux“, „Medicomp“), todėl sekretas nesusikaupia po „Grassolind neutral“ tvarščiu.

- „Grassolind neutral“ galima lengvai karpyti į nedidelius gabalėlius, pvz., naudojant kaip matricą audiniams persodinti.

- Netgi naudojant ilgesnį laiką „Grassolind neutral“ neįjautrina odos ir nesukelia alerginės reakcijos.

- Esant būtinybei (atsižvelgiant į žaizdos būklę), galima derinti su kitomis gydymosiomis priemonėmis. Nerekomenduojama ant „Grassolind neutral“ tvarščio tepti tepalo.

Indikacijos

1. Bendrai žaizdoms gydyti, ypač paviršinėms, sekretuojančioms žaizdoms, pvz., plėtinėms žaizdoms, nubrozdinimams, sumušimams, nudegimams ir pan.

2. Plastinėje ir kosmetinėje chirurgijoje.

3. Pašalinus nagus, po fimozės operacijos.

4. Odos donoriniams plotams padengti ir odos transplantantui fiksuoti.

5. Idealiai tinka naudoti dermatologijoje, pacientams, kurių jautri oda.

Naudojimas

Atidarius sterilų pakuotę išimti „Grasso-

lind neutral“ kartu su abiem apsauginiais lapeliais; jei reikia, atkirpti reikiamą dydį. Nuimti vieną apsauginį lapelį, uždėti tvarstį ant žaizdos ir tik tuomet nuklijuoti antrąjį. Sekreto pertekliui pašalinti reikia ant „Grassolind neutral“ tvarščio uždėti sterilų absorbuojamąjį tvarstį. Jei kitaip nenurodyta, kiekvieno perrišimo metu „Grassolind neutral“ keičiamas kitu tvarščiu. **Svarbi pastaba:** palikus tvarstį ant žaizdos ilgesniam laikui (ilgiau nei 2 d.), tepalas rezorbuojasi. Prilipus „Grassolind neutral“ tvarščiu, ant viršaus uždedamas dar vienas „Grassolind neutral“ tvarstis, palaukiama, kol tepalas įsigers, ir tada lengvai pašalinami abu tvarščiai.

„Grassolind neutral“ sterilūs, supakuoti po vieną: 5×5 cm; 7,5×10 cm; 10×10 cm; 10×20 cm.

* * *

„Atrauman“ nemedikamentiniu tepalu impregnuotas tvarstis iš hidrofobinio, tankaus, lygiu paviršiumi poliesterio tinklelio. Impregnuotas neutraliu tepalu „Atrauman“ tvarstis skatina (palaiko) žaizdos gijimą esant bet kokiai žaizdos gijimo fazei.

Apibūdinimas

- „Atrauman“ specifinės medžiagos užtikrina netrauminių žaizdos gydymą.

- Plonas minkštas hidrofobinis poliesterio tinklelis paviršinės struktūros dėka stabdo audinių praskisvertimą į tvarstį ir neleidžia prilipti prie žaizdos.

- Ypač minkštas, lengvai prigludantis „Atrauman“ tvarstis neprilimpa prie žaizdos, nes yra impregnuotas tepalu. Todėl ir tvarščio keitimas yra neskausmingas ir netraumuojantis.

- „Atrauman“ išlaiko žaizdos paviršių ir kraštus elastingus, apsaugo žaizdą nuo išdžiūvimo. Išvengiama randinių kontraktūrų.

- Impregnuotas tepalu „Atrauman“ tvarstis pralaidus orui ir sekretui. Taip užtikrinama, kad pateks pakankamai oro ir greitai bus pašalintas perteklinis sekretas. Sekretui pašalinti „Atrauman“ tvarstis naudojamas kartu su

absorbuojamaisiais tvarščiais, pvz., „Sterilux“, „Medicomp“ ir kt.

- Tepalas neturi vazelinų priemaišų ar kitų parafinų. Tvarstis nepalieka sunkiai pašalinamų tepalo likučių. Tai leidžia lengvai įvertinti žaizdos būklę ir lengviau ją valyti.

- Net naudojant ilgesnį laiką, „Atrauman“ nesukelia įjautrinimo ar alerginės reakcijos.

Indikacijos

Netrauminiams žaizdos gydymui esant bet kokiai jos gijimo fazei, ypač kai reikia žaizdos paviršių palaikyti elastingą, pvz., plėstinėms žaizdoms, nubrozdinimams, nudegimams, *ulcus cruris*, praguloms, esant spinduliniams pažeidimams, abscesams, furunkulams, karbunkulams, panaricijoms gydyti; rekomenduojamas donoro ir recipiento odos transplantacijos vietoms padengti, plastinėje ir kosmetinėje chirurgijoje, po nagų pašalinimo, fimozės operacijų ir kt. Kadangi „Atrauman“ tvarstis impregnuotas nemedikamentiniu tepalu, idealiai tinka naudoti dermatologijoje, taip pat pacientams, kurių jautri oda. Gydytojai savo nuožiūra tvarstį gali derinti su medikamentais.

Naudojimas

Atidarius pakuotę išimti „Atrauman“ tvarstį kartu su dviem apsauginiais lapeliais. Jei reikia, atkirpti reikalingą tvarščio dydį. Pašalinus vieną apsauginį lapelį, uždėti tvarstį ant žaizdos. Nuimti antrą apsauginį lapelį. Jei reikia, sekreto pertekliui pašalinti ant „Atrauman“ uždėti sterilų absorbuojamąjį tvarstį. Jei kitaip nenurodyta, „Atrauman“ tvarstis turi būti keičiamas kiekvieno žaizdos perrišimo metu. **Svarbi pastaba:** kai „Atrauman“ tvarstis ant žaizdos paliekamas ilgesniam laikui, tepalas rezorbuojasi. Tokiu atveju, prilipus tvarščiu prie žaizdos, ant viršaus uždedamas dar vienas „Atrauman“ tvarstis, palaukiama, kol tepalas įsigers, ir tada švelniai nuimami abu tvarščiai.

„Atrauman“ sterilūs, supakuoti po vieną: 5×5 cm; 7,5×10 cm; 10×20 cm.

Parengė Nijolė Lipskytė